

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПЛЕКТА ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ НИЗКОИНТЕНСИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ (КИВЛ-01) ТУ 9444-001-17515211-98

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВО ИЗБЕЖАНИИ ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМ И ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ КИВЛ-01

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Комплект совместим с любыми типами лазерных аппаратов и предназначен для проведения процедур внутривенного облучения крови низкоинтенсивным лазерным излучением.

Комплект разрешен к применению на территории РФ (Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ № ФСР 2008/02763), имеет сертификат соответствия и декларацию о соответствии.

2. СОСТАВ КОМПЛЕКТА.

Комплект состоит из сменных световодных стерильных насадок в индивидуальной упаковке однократного применения. Световодная насадка с бабочкой и канюлей, диаметр волокна 500 мкм, с иглой 0,8х40.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

1. Вскрыть пакет с одноразовой насадкой;
2. Подготовить вену для проведения процедуры.
3. Снять с иглы защитный колпачок, отсоединить "бабочку" от иглы и сдвинуть ее на 3-5 мм (конец световода должен уйти внутрь иглы).

ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ПОПЫТКИ ВВЕСТИ В ВЕНУ СВЕТОВОД БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ П.3 БУДУТ НАБЛЮДАТЬСЯ СИЛЬНЫЕ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ (ЭФФЕКТ «ТУПОЙ» ИГЛЫ).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТОВ 3 И 4 НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ТОРЦА СВЕТОВОДА ОТ ТКАНЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОПАСТЬ НА НЕГО В ПРОЦЕССЕ ВВЕДЕНИЯ ИГЛЫ В ВЕНУ И, КОТОРЫЕ, БУДУТ ОСЛАБЛЯТЬ СВЕТОВОЙ ПОТОК, СНИЖАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ.

4. Провести иглой пункцию вены. Соединить "бабочку" с иглой и зафиксировать "бабочку" на руке пластырем;
5. Соединить насадку с магистральным световодом (в случае, если магистральный световод не предусмотрен в конструкции лазерного аппарата, коннектор насадки соединяется непосредственно с оптическим адаптером аппарата);
6. Проводить процедуру облучения в соответствии с существующими методиками по внутривенному облучению крови. извлечь из вены одноразовую насадку с иглой, обработать место прокола.
7. Отсоединить насадку от аппарата и утилизировать.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При эксплуатации комплекта запрещается направлять торцы насадок в глаза или на блестящие и отражающие поверхности.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Световодные насадки являются одноразовыми, стерилизованными радиационным способом и повторной стерилизации не подлежат. По мере использования насадок, их можно приобрести у изготовителя комплекта в любом количестве.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1. Световоды, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, подлежат утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными законодательством Российской Федерации (СанПиН 2.1.7.2790).
- 6.2. Неиспользованные Световоды (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов), или с истекшим сроком хранения (годности) должны быть утилизированы в соответствии с порядком утилизации твердых бытовых отходов, установленным законодательством Российской Федерации

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Срок годности для световодных насадок КИВЛ-01 - 24 месяца (номер партии и дата указаны на каждой упаковке).

7. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

119991, г. Москва, ул. Вавилова, д.38
Тел/факс (499) 135-41-68 E-mail 1326056@mail.ru